

Actualizare - NOTIFICARE URGENTĂ REFERITOARE LA SIGURANȚA ÎN TEREN

**ACTUALIZARE OBLIGATORIE A LIBRĂRIEI DE TESTE LA VERSIUNEA
02.05.00 PENTRU ANALIZOARELE DE COAGULARE ACL ELITE®/ELITE PRO**

3 februarie 2023

Stimate client utilizator al ACL Elite/ACL Elite Pro

Această notificare are scopul de a vă informa că Werfen emite o actualizare **obligatorie** a librăriei de teste pentru analizoarele de coagulare ACL Elite/Elite Pro (Librărie de teste 02.05.00).

Vor fi actualizate următoarele instrumente:

Denumire produs	Cod de catalog (P/N)
ACL Elite	0000880311
ACL Elite/Elite Pro	0001000311
ACL Elite Refurb	0000880311R
ACL Elite Pro Refurb	0001000311R

Aceasta este o continuare a notificării originale în care ați fost informat cu privire la îndepărtarea HemosIL® Liquid Anti-Xa (PN 0020302600/0020302601) de pe ACL Elite/Elite Pro.

Această nouă versiune **obligatorie** a librăriei de teste, printre alte caracteristici, elimină aplicația HemosIL Liquid Anti-Xa (PN 0020302600/0020302601).

Versiunea **obligatorie** a librăriei 02.05.00 poate fi instalată pe sistemele din seria ACL Elite/Elite Pro care rulează în prezent cu versiunea software 04.00.00 sau 03.01.04 cu librăria 02.03.00 sau o versiune superioară. Orice sistem ACL Elite/Elite Pro care rulează cu o versiune a librăriei de teste anterioară 02.03.00 va necesita

mai întâi un upgrade la software-ul ACL Elite/Elite Pro 04.00.00 sau 03.01.04, cu librăria de teste 02.03.00, înainte de a face upgrade la librăria de teste 02.05.00.

Reprezentantul dumneavoastră local Werfen va instala librăria de teste **obligatorie** 02.05.00 la următoarea vizită de mentenanță preventivă sau de service.

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență suplimentară, vă rugăm să contactați reprezentantul local Werfen.

Cu stimă,

Andreea Pătrașcu



Responsabil de conformitatea cu reglementările
MEDIȘT S.R.L. - Distribuitor autorizat Werfen (Instrumentation Laboratory) în
România

CONFORM
CU
ORIGINALUL